

Extractor de implantes

El extractor de ML Implant System® le permitirá retirar implantes cuya conexión este dañada, en los que no es posible utilizar el instrumento de inserción (Montador) habitual o como alternativa a la fresa trefina cuando se desea conservar la mayor cantidad de hueso posible. Puede utilizarse en implantes de conexión externa SHE, interna SHI y SRI.



MEDIDAS DE SEGURIDAD:

Se debe esterilizar el extractor antes de su uso, en la víspera o el día de la intervención.

No esterilizar en su envase original.

Utilice el extractor en combinación con productos ML Implant System.

Antes de cada uso inspeccione el estado del instrumento.

Limpie el extractor lo más rápido posible luego de la intervención (ver instructivo de limpieza y esterilización en www.mlimplantsystem.com.ar)

No utilice cepillos metálicos u otros instrumentos para limpiar que puedan rayar el instrumental.

Se recomienda utilizar en combinación con un elemento de control de torque.

PROCEDIMIENTO:

1. Conecte el extractor de implantes a la llave cricket o torquímetro.
2. Asegure de que la flecha del torquímetro este en sentido contrario al giro de las agujas del reloj.
3. Coloque el extractor en el implante.
4. Desatornille el implante en sentido contrario al giro de las agujas del reloj (NO EXCEDER 170 N.cm de torque)

ADVERTENCIAS:

La aplicación de un torque excesivo durante el procedimiento podría ocasionar daños o fracturas en la estructura ósea.

Cuando no sea posible retirar el implante sin ejercer demasiada fuerza, considere fresar el hueso en torno al implante o retirar con una fresa trefina.

Debido al tamaño reducido de los componentes, se debe prestar atención a que el paciente no trague accidentalmente el dispositivo.

Antes de utilizar el dispositivo asegúrese de haber recibido y entendido toda la información necesaria para realizar la intervención.

FABRICADO POR:



STEELDEC S.A.
Valparaiso 4100 – Parque Industrial Tortuguitas – C.P. 1667 –
Buenos Aires – Argentina
Tel.: 54 02320-627688/99 / e-mail: info@steeldec.com.ar




IMPORTACIÓN DENTAL ESPECIALIDADES S.L.
Av. de las Nieves 8 - P.I. Las Nieves - C.P. 28935 - Móstoles - Madrid - España




Director técnico: Farmacéutico: Claudio Coccozza MN: 15385 / MP: 18716

Número de registro de producto médico: PM-1953-1

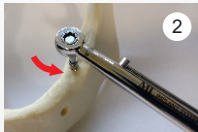

2

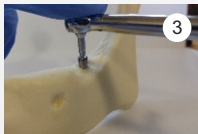

3



4